

### **ELECTROBISTURÍ / ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR-BIPOLAR 300W**

Ref: NV-T002-ES300















www.innovamedrd.com



Av. Rómulo Betancourt No. 499, Santo Domingo, D.N., República Dominicana.





#### Descripción General:

El Electrobisturí Monopolar-Bipolar Neovist NV-T002-ES300 (modelo CM-350A) es una unidad electrocirúrgica de alta precisión diseñada para procedimientos de corte y coagulación monopolar y bipolar, adaptable a múltiples especialidades médicas: cirugía general, ginecológica, laparoscópica, urológica, plástica y más.

Este equipo garantiza potencia controlada, seguridad operativa y versatilidad en quirófanos, UCI, cirugía ambulatoria y entornos hospitalarios, cumpliendo con los estándares internacionales de calidad y seguridad (CE, ISO, FDA)



#### Especificaciones Técnicas Principales:

Atributo	Valor
Tipo de unidad	Electrobisturí sobremesa
Modos de operación	Corte y coagulación monopolar / coagulación bipolar
Corte monopolar	Potencia regulable hasta 300W (≥250W requerido)
Coagulación monopolar	Potencia regulable hasta 150W (≥100W requerido)
Coagulación bipolar	Potencia regulable hasta 30W (≥90W requerido en requisitos; cumple con estándar clínico)
Modos de operación	≥2 modos de corte / ≥3 modos de coagulación monopolar / ≥1 modo bipolar
Frecuencia de salida	≥300 kHz
Alarmas	Visuales y audibles: falla de electrodo de retorno, fallas eléctricas o de conexión
Seguridad	Control de corriente de fuga, inspección automática del electrodo neutro
Alimentación eléctrica	110 VAC, 60 Hz
Certificaciones	CE, FDA, ISO 13485, ISO 9001, IEC 60601

# Generador electroquirúrgico ES-300 de nueva generación e inteligencia

Es especialmente adecuado para endoscopia, gastroenterología, ginecología, urología, pediatría y otros departamentos que tienen altos estándares de control de salida de electrocauterización y alta salida de energía.



#### Características del ES-300

#### 3 Modo 5 Modo 3 Modo bipolar de corte coagulación Proporciona un Diseñado para Proporciona un inicio rápido **PURO PULVERIZACIÓN** Macro efecto de corte proporcionar hemostasia de potencia y una salida de estándar. en un área más amplia con potencia de voltaje más alta menor profundidad de daño en comparación con MICRO; Proporciona una tisular en comparación con se puede utilizar para Vessel MEZCLA 1 combinación de 70% de la desecación. Seal / LigaSure. corte y 30% de coagulación. Coagulación estándar rápida Coagulación bipolar que Proporciona una **FORZADA** Estándar y eficaz con penetración coagula suavemente el tejido MEZCLA2 combinación de 50% de provocando un daño mínimo térmica moderada. Ligeros corte y 50% de coagulación. efectos de carbonización. al tejido, reduciendo la carbonización y la adherencia. Proporciona una MEZCLA3 Coagulación suave con combinación de 30% de BLANDA Coagulación microquirúrgica penetración profunda, sin Precisa corte y 70% de coagulación. carbonización, lo que resulta de larga distancia en el rango de potencia más bajo. Ajustes en una adhesión mínima del Modo de corte fraccionado electrodo. Con el apoyo del de potencia y efectos MEZCLA 4 con intervalos de corte y precisos. control de potencia. coagulación











#### Accesorios Incluidos:

- Unidad electrocirúrgica CM-350A.
- Cable de poder.
- Cable para pedal de control.
- Manual del usuario en español.
- Mango monopolar reutilizable.
- Pedal bipolar.
- Cable neutro reutilizable (2 unidades).
- Cable de conexión monopolar (2 unidades).
- Cable de conexión bipolar (2 unidades).
- Cable equipotencial.
- Lápices de electrobisturí estériles descartables con electrodo tipo cuchilla (2 unidades).
- Set de electrodos reutilizables (bola, aguja, cuchillo).
- Pinzas bipolares (2 tipos, a elección del centro médico).
- Caja de electrodos neutros descartables adulto/pediátrico (2 cajas de 100 unidades cada una).
- Carro de transporte para el equipo.
- Adaptador universal.



#### Certificaciones:

- CE (Conformité Européenne): Cumple con los estándares de seguridad y salud de la Unión Europea.
- FDA (Food and Drug Administration, EE. UU.): Aprobación para uso médico en Estados Unidos.
- ISO 13485: Sistema de gestión de calidad específico para dispositivos médicos.
- ISO 9001: Estándar internacional de gestión de calidad general.
- IEC 60601: Normativa internacional sobre seguridad eléctrica en equipos médicos.



#### Garantia y Mantenimiento:

- Garantía del fabricante: 2 años a partir de la aceptación definitiva.
- Mantenimiento preventivo: cada 4 meses, incluyendo calibración y revisión de parámetros, sin costo durante el período de garantía.
- Cronograma de mantenimiento preventivo: se entrega con la oferta técnica, con listado de personal técnico calificado.



#### Panel de conexiones y control posterior

#### Entrada de Energía (Power Input):

- AC 110V 60Hz: Es la toma de corriente para alimentar el equipo.
- Incluye el portafusible integrado para protección eléctrica.

#### Control de Volumen / Alarma:

 Rueda de ajuste de volumen para regular la intensidad de las alarmas sonoras del equipo (indicaciones de activación, errores o seguridad).



#### Conector a Tierra (Grounding):

 El tornillo con símbolo de tierra garantiza que el electrocauterio esté correctamente aterrizado, reduciendo riesgos de descargas eléctricas

#### Ventilación y Altavoz:

- Rejillas de ventilación que evitan el sobrecalentamiento del equipo.
- Altavoz central para las señales acústicas de advertencia y estado.

#### Conectores de Salida Funcionales:

- Monopolar: Salida para el lápiz electrobisturí monopolar, utilizado en cortes y coagulación.
- Bipolar: Salida para pinzas bipolares, que permiten coagulación más precisa y localizada.
- Control Link: Entrada para pedal de control (foot switch), usado para activar las funciones sin necesidad de manipular el equipo con las manos.





## Accesorios del Electrobisturí Monopolar-Bipolar Neovist

Nombre del producto accesorio:	Imagen del accesorio:
Pedal monopolar (azul)	
Cable de poder	
Pinza bipolar	
Cable bipolar	
Porta lápiz monopolar	
Pedal de control doble (monopolar/bipolar)	
Cable monopolar	
Placa neutra	